

## Montage der Matratze

---

RotoBed® Home wird mit einer Matratze geliefert, die aus einem Hauptteil und einem Fußteil besteht.

Die Hauptmatratze hat 5 Knöpfe auf der Rückseite.


- Legen Sie zuerst die drei unteren Knöpfe in die Nuten an der Unterseite des Bettes.
- Schieben Sie die Matratze in Richtung Fußende.
- Drücken Sie nun die beiden Knöpfe in der Mitte der Matratze in die entsprechenden Löcher in der Mitte des Bettes.

Ebenso hat die Fußmatratze zwei Knöpfe, die in die zwei runden Löcher im Bett passen.

## Montage die Bettgitter

---

RotoBed® Pflegebetten können mit Bettschienen aus Metall oder Eichenlaminat geliefert werden. Unabhängig vom Material werden die Bettschienen auf die gleiche Weise montiert und entfernt:

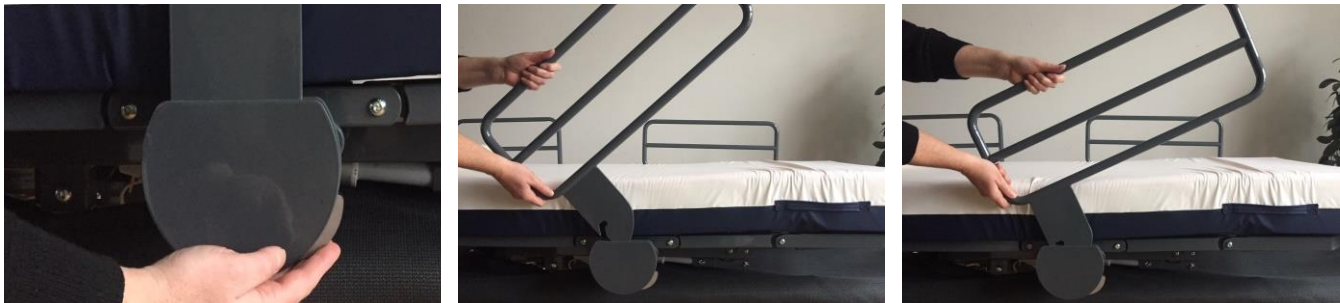

Drücken Sie den kleinen Beschlag, während Sie die Bettgitter.

Die Bettgitter können einfach wieder eingesetzt werden und verschließen sich automatisch.

**NB!** Die Seitengitter müssen entweder montiert oder entfernt werden. Lassen Sie sie nicht senkrecht in der Halterung stehen. Dies kann zu Quetschungen und Schäden am Bett während der Drehung führen.

---

**NB!** RotoBed® Home darf nicht von Personen ohne Einführung in die Benutzung des Bettes verwendet werden.

RotoBed® Home ist gemäß der Richtlinie (EU) 2006/42 / EF CE-gekennzeichnet.

RotoBed® Home darf ausschließlich mit der Fernbedienung bedient werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder sich des Quetschrisikos bewusst sind, wenn Sie die Positionen des Bettes anpassen. Wenn das Beinteil des Bettes angehoben ist, überladen Sie es nicht mit schweren Gegenständen oder Personen.

---

## Kurzanleitung für RotoBed® Home



**Einsteigen:** Setzen Sie sich so nah wie möglich an den Rücken. Halten Sie die Taste **Liegeposition** gedrückt, bis das Bett horizontal gedreht ist.




**Aussteigen:** Drücken Sie die Taste **Sitz-position**, bis das Bett in der Ausgangs-position stoppt. Um den Ausgang zu erleichtern, können Sie mit der Fernbedienung die Rückenlehne nach vorne schieben.



Standard ist einen schrägen Ausgang, um den Übergang zu einem Rollstuhl oder Rollator zu erleichtern. Wenn Sie einen senkrechten Ausgang wünschen, lesen Sie die Bedienungsanleitung.

## Fernbedienung

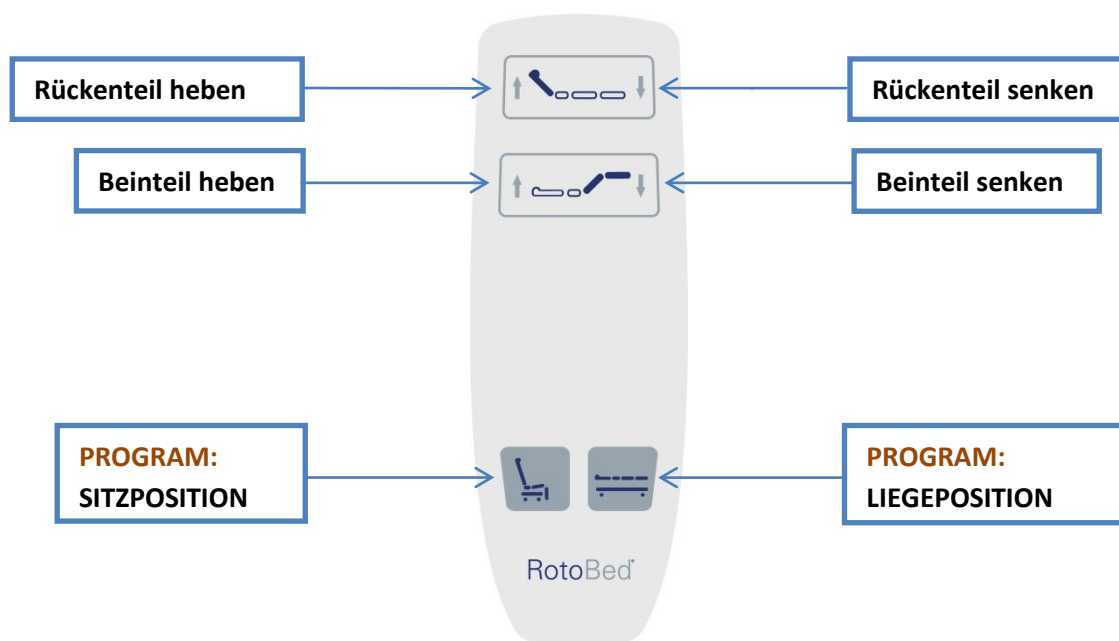

RotoBed® Home kann entweder nach rechts oder nach links drehen. Daher kann die Fernbedienung auch an der rechten und linken Seite des Bettes angeschlossen werden. Extra Fernbedienung kann wie gewünscht erworben werden. Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, hängen Sie sie an die Bettgitter.