

## Reinigung von RotoBed®Home in einem Waschsystem

RotoBed®Home ist gemäß der Norm IPX6W (Wasserbewertung) zugelassen und in einem Waschsystem waschbar. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine Beschädigung des Bettes zu vermeiden:

- Ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie alle Stoffe (einschließlich Matratze und Bezüge) sowie alle Holzteile.
- Alle Steckverbindungen müssen mit einer Steckerabdeckung abgedichtet werden.
- Alle Stecker und Steckerabdeckungen müssen mit Sperrungen ausgestattet sein damit kein Wasser in die Motoren eindringen kann.
- Fahren Sie alle Motoren vollständig nach unten / innen (damit keine Motorarme herausragen), um Kalk- und Rostbildung zu vermeiden.
- Die elektrischen Teile des Bettes und die mechanischen Funktionen müssen vor der erneuten Verwendung des Bettes geprüft werden.

RotoBed® weist darauf hin, dass das Waschen in Maschinen dazu führt, dass das Bett mit der Zeit schneller altert.