

## Vask af RotoBed®Free i vaskeanlæg

RotoBed®Free er godkendt efter normen IPX6W (Water rating) og tåler vask i vaskeanlæg. Følg instruktionerne omhyggeligt for at undgå skader på sengen:

- Tag elstikket ud og fjern alle tekstiler (herunder madras og betræk) samt alle dele af træ.
- Sørg for, at alle stik på sengen sidder i stikdåserne.
- Alle stikindgange skal være forseglede med kabelstik eller dækprop.
- Alle stik og dækpropper skal være forsynet med låse-ring (se afsnit 5.12), så de slutter tæt.
- Kør alle motorer helt ned/ind for at forebygge kalk- og rustdannelse.
- Test sengens elektriske dele og mekaniske funktioner inden ny anvendelse af sengen.

**OBS:** De medfølgende standardhjul til en RotoBed®Free er **ikke** testet til vask i anlæg. Medmindre hjulene afmonteres før vask, må der påregnes en kortere levetid for hjulene ved brug af vaskeanlæg. Alternativt kan tilkøbes særlige hjul, som er testet til vaskeanlæg.

RotoBed® gør opmærksom på, at vask i anlæg vil medføre, at sengen ældes hurtigere over tid.