

Montage du matelas


RotoBed®Home est livré avec un matelas composé d'une partie principale et d'une partie de pied.

Le matelas principal a 5 boutons à l'arrière. Placez d'abord les trois boutons inférieurs dans les rainures au bas du lit. Faites glisser le matelas vers le pied. Maintenant, placez les deux boutons au centre du matelas dans les trous correspondants au milieu du lit.

De même, le matelas de pied a deux boutons, qui s'insèrent dans les deux trous ronds dans le lit.

Montage des barrières de lit

RotoBed®Home peut être livré avec des barrières en métal ou en placage de chêne. Quel que soit le matériel, les rails de lit sont montés et retirés de la même manière :

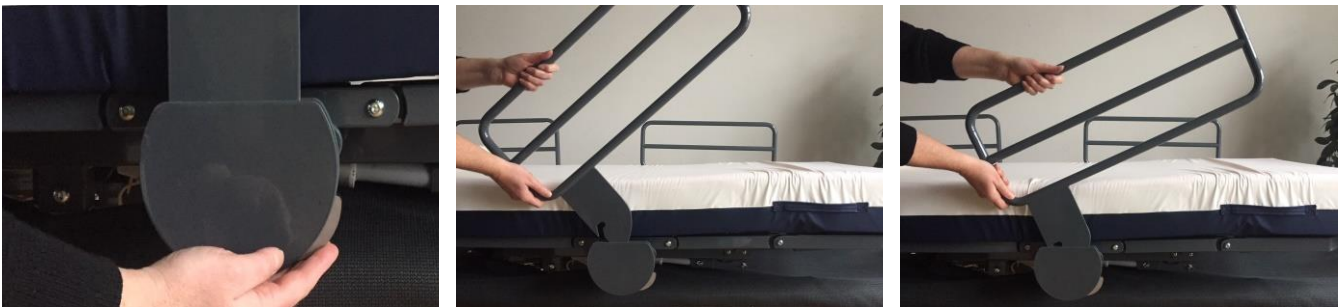

Appuyez sur le petit raccord en dessous tout en soulevant la barrière de lit.

La barrière de lit peut tout simplement être remise en place, elle se verrouillera automatiquement.

Ne laissez pas barrières droites et desserrés dans le support. Cela peut entraîner un risque de pincement et endommager le lit pendant la rotation.

Remarque: RotoBed®Home ne doit pas être utilisé par des personnes sans introduction à l'utilisation du lit.

RotoBed®Home est marqué CE conformément à la directive (UE) 2006/42 / EF.

RotoBed®Home doit être utilisé exclusivement avec la télécommande. Assurez-vous que les enfants sont conscients du risque de coincement lors du réglage de la position du lit. Lorsque la jambe du lit est relevée, ne la surchargez pas d'objets lourds ou de personnes.

Guide rapide pour RotoBed®Home



Entrée : Installez-vous le plus près possible du dossier. Appuyez sur la touche **Position de sommeil** jusqu'à ce que le lit soit tourné et horizontal. Maintenant, vous pouvez ajuster les parties dossier et jambe comme vous souhaitez.




Sortie : Appuyez sur la touche **Position du fauteuil** jusqu'à ce que le lit s'arrête en position de sortie. Pour faciliter la sortie, vous pouvez, avec la télé-commande, déplacer le dossier vers l'avant.



Remarque: En standard, RotoBed®Home est programmé pour une sortie oblique pour faciliter le transfert vers un fauteuil roulant ou une marchette. Si vous souhaitez une sortie perpendiculaire, consultez le mode d'emploi.

Télécommande

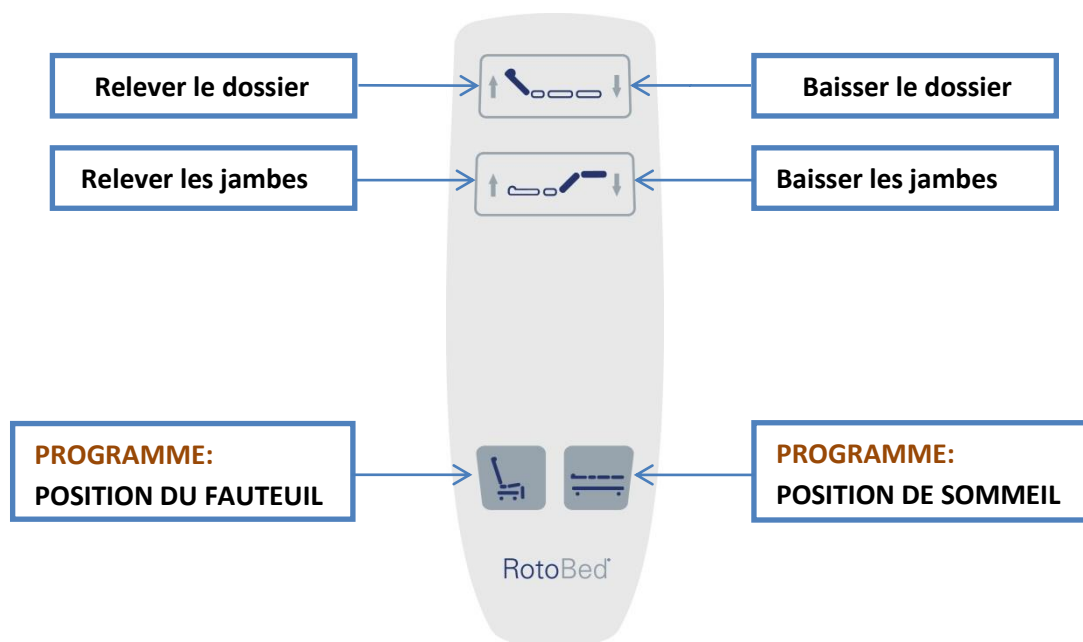

RotoBed®Home peut tourner à gauche ou à droite selon le souhait de l'utilisateur. Par conséquent, la télécommande peut également être connectée sur le côté droit ou gauche du lit. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, suspendez-la sur la barrière de lit.