


La télécommande peut être branchée au choix sur le côté droit ou gauche du lit sous la pièce centrale du siège.

Appuyez sur une touche pour faire fonctionner le lit. Lorsque vous relâchez la touche, le mouvement s'arrête.

N'appuyez que sur deux touches à la fois lorsque vous souhaitez reprogrammer le lit (voir ci-dessous). Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, accrochez-la sur une barrière de lit.

ASTUCE : Vous pouvez soulager la pression sur vos talons en soulevant un peu la partie de la jambe. Ainsi, la pression est répartie sur les muscles de vos mollets et vos talons sont dégagés du matelas.

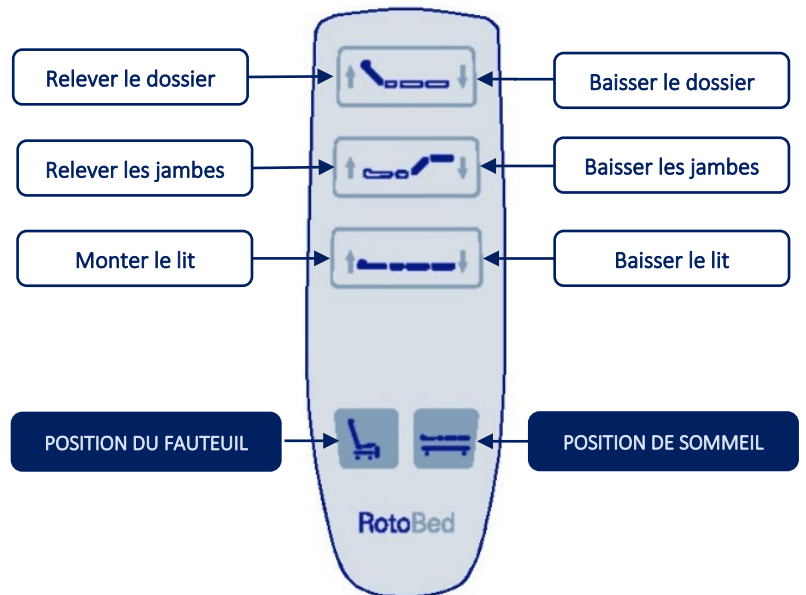

Entrée




Pour un meilleur confort, installez-vous le plus près possible du dossier. La hauteur de sortie standard sans matelas est de 32 cm au-dessus du sol. La hauteur optimale est lorsque toute la surface du pied repose sur le sol sans supporter le poids de vos jambes. Utilisez les touches de hauteur de lit pour trouver votre hauteur préférée.



Mémo-risez la hauteur de sortie en appuyant simultanément sur les deux touches de hauteur du lit pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Le lit se déplacera alors automatiquement à la hauteur mémorisée chaque fois que la touche **POSITION DU FAUTEUIL** est activée.

Inclinaison dossier lors de la rotation

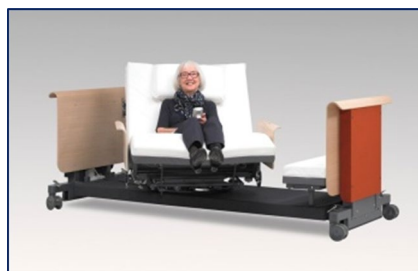


Il est important que vous vous asseyiez confortablement sans pression sur la région abdominale pendant que le lit tourne. L'inclinaison standard du dossier à la livraison est de 45°. L'inclinaison peut être réglée sur un angle de 35° à 65°. En dehors de cette plage, le lit déclenchera une alarme. Mettez le dossier à votre inclinaison préférée lors de la rotation.



Appuyez simultanément sur les deux touches du dossier pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Maintenant, votre inclinaison de dossier préférée est enregistrée et le lit se déplacera toujours vers cette inclinaison lors de la rotation.

Sortie

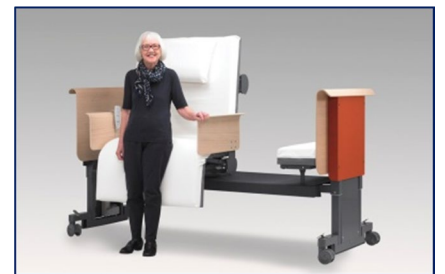

Appuyez sur la touche **POSITION DU FAUTEUIL** jusqu'à ce que le lit s'arrête en position de sortie. Pour faciliter la sortie, le dossier peut être avancé un peu en appuyant sur la touche "Relever le dossier". Utilisez ensuite la touche « monter le lit ». De cette façon, vous obtenez un soutien supplémentaire pour sortir du lit.






Pour une sortie perpendiculaire, appuyez sur les deux touches **POSITION** pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

L'angle de sortie est oblique en standard pour faciliter la transition vers un fauteuil roulant ou un déambulateur.

Montage des barrières de lit



RotoBed®Free peut être livré avec des barrières en métal ou en placage de chêne. Quel que soit le matériel, les barrières de lit sont montées et retirées de la même manière :

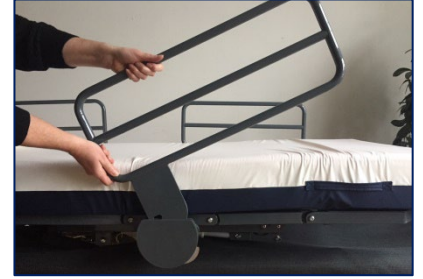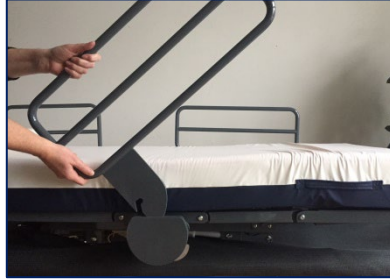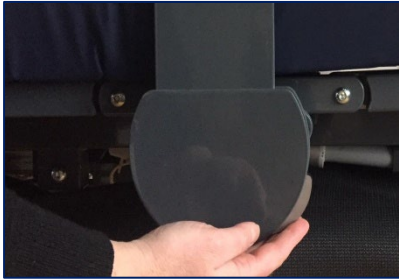

Appuyez sur le petit raccord en dessous tout en soulevant la barrière de lit. La barrière de lit peut tout simplement être remise en place, elle se reverrouillera automatiquement.

Remarque : Les Barrières de lit doivent être montés ou retirés. Ne les laissez pas à la verticale dans le support. Cela peut entraîner un risque de pincement et endommager le lit pendant la rotation.

Montage du matelas

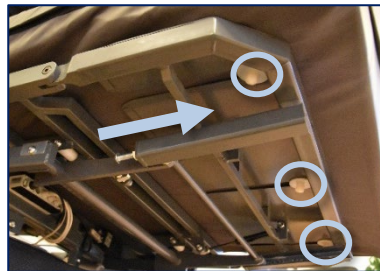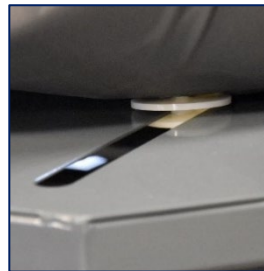

Déplacez la partie jambe vers la position la plus haute à l'aide de la télécommande. Pliez le matelas en deux et placez-le de manière à ce que les 3 fixations du matelas soient placées à l'ouverture des 3 trous de la partie jambe. Il est important qu'il y ait un disque en nylon sur le dessus et le dessous de la plaque métallique. Tirez ensuite le matelas vers le pied de manière à ce que les 3 fixations du matelas glissent jusqu'au fond des trous. Déplacez la surface plane du cadre de lit complètement à l'horizontale à l'aide de la télécommande.

Poussez la fixation du matelas qui est placée au milieu à l'arrière du matelas (une de chaque côté) dans le trou de la surface plane du cadre de lit. Vous pouvez avantageusement tourner la bande velcro dure sur le côté afin qu'elle ne serre pas le velcro souple. Il est important qu'il y ait un disque en nylon sur le dessus et le dessous de la plaque métallique. Ceci est assuré en appuyant sur le matelas pendant que le matelas est tiré vers le côté. Tirez la bande Velcro vers le bord du lit afin que le disque supérieur en nylon soit fermement attaché à la surface plane du cadre du lit. Maintenant, pressez bien les deux morceaux de velcro l'un contre l'autre. Répétez ensuite la procédure de l'autre côté du lit.

Roues et freins

En standard, le lit est équipé de roues doubles Tente Linea intégrées. Les roues sont rotatives. Les freins fonctionnent par paires et peuvent être actionnés des deux côtés du lit.



← Roues bloquées

Roues déverrouillés →



Remarque : RotoBed®Free ne doit pas être utilisé par des personnes sans introduction dans l'utilisation du lit. RotoBed®Free doit être utilisé exclusivement avec la télécommande. Le lit est testé selon les dernières normes et règles applicables pour les lits de soins. Sachez que ni les enfants ni les animaux ne sont sous le lit lorsque les pièces du lit sont fixées. Lorsque la jambe est soulevée, ne la surchargez pas d'objets lourds ou de personnes. Le lit peut être utilisé par les utilisateurs selon les critères suivants : Poids 40-190 kg. Hauteur ≥ 146 cm. IMC ≥ 17.