

Instalação do Colchão


RotoBed®Free é fornecida com um colchão composto por uma parte principal e uma parte para os pés.

O colchão principal possui 5 botões nas costas. Primeiro coloque os três botões inferiores nas ranhuras existentes na parte inferior da cama. Deslize o colchão em direção da peseira. Pressione os dois botões no centro do colchão nos orifícios correspondentes no meio da cama.

O colchão para os pés também tem dois botões, que se encaixam nos dois orifícios redondos da cama.

Montagem das guardas laterais

RotoBed®Free pode ser entregue com guardas laterais de metal ou folheado de carvalho. Independentemente do material, as guardas laterais são montadas e removidas da mesma forma:

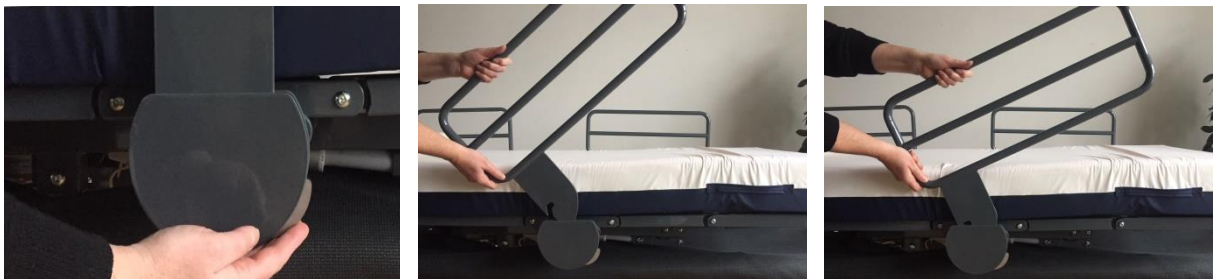

Prima o pequeno encaixe que existe por baixo enquanto levanta a grade lateral.

Basta colocar as guardas laterais no lugar para que fiquem automaticamente trancadas.

NB! As guardas laterais só devem estar montadas ou desmontadas. Não as deixe soltas e colocadas na vertical. Isso pode causar risco de compressão e danos na cama durante a rotação.

Rodízios e travões



Rodízios bloqueados

Por norma, a cama vem com rodízios duplos Tente Linea integrados. Os rodízios são giratórios.

Os travões funcionam em pares e podem ser comandados de ambos os lados da cama.



Rodízios desbloqueados

Note: RotoBed®Free não deve ser usado por pessoas sem prévia informação sobre o uso da cama. A cama está testada de acordo com os mais recentes padrões e regras aplicáveis a camas de cuidado. RotoBed®Free deve ser operada exclusivamente com o telecomando. Certifique-se de que nem crianças nem animais estão debaixo da cama quando as peças da cama forem instaladas. Quando a zona das pernas da cama estiver levantada, não a sobrecarregue com objetos pesados ou pessoas. A cama deve ser utilizada por pessoas que obedeçam aos seguintes critérios: Peso 40-190 kg. Altura \geq 146 cm. IMC \geq 17.

Guia para a RotoBed® Free



Saída: Mantenha premida a tecla **Posição da cadeira** até a cama parar numa posição de saída. Para facilitar a saída, pode usar o telecomando para levar o encosto um pouco mais para a frente e levantar um pouco a cama.



Nota: Por predefinição e para facilitar a transição da cama para uma cadeira de rodas ou andarilho a cama está programada para parar numa posição oblíqua de saída. Se desejar programar para uma saída na perpendicular, consulte o manual de utilizador.




Entrada: Sente-se o mais perto possível do encosto para um maior conforto. Mantenha premida a Tecla da **Posição de dormir** até a cama rodar e ficar na horizontal. Agora, RotoBed®Free passa a funcionar como uma cama médica normal.



A altura padrão do assento sem colchão é de 32 cm acima do chão. Para configurações individuais, consulte o manual do utilizador.

Telecomando

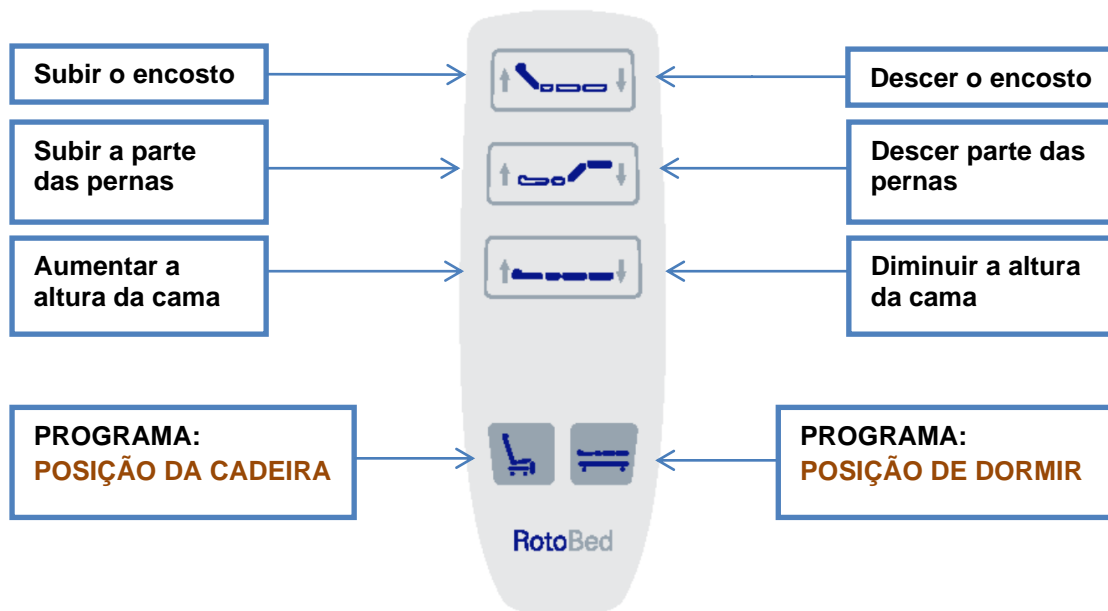

RotoBed®Free pode virar à direita ou à esquerda. O telecomando pode ser conectado tanto ao lado direito como ao lado esquerdo da cama.

Para operar a cama, mantenha premida uma tecla. Quando soltar a tecla, o movimento pára. Só deve premir duas teclas simultaneamente quando quiser reprogramar a cama. Pode adquirir um telecomando opcionalmente. Quando não estiver a usar o telecomando, pendure-o na guarda lateral.