

Montering av madrass


RotoBed®Home innehåller en madrass som består av en huvuddel och en fot-del.

Huvudmadrassen är utrustad med 5 knappar på baksidan. Lägg först de tre nedre knapparna i spåren längst ner på sängen. Skjut madrassen mot foten. Tryck nu på de två knapparna i madrassens mitt ner i motsvarande hål i mitten av sängen.

På samma sätt har fotmadrassen två knappar som pressas ner i de två runda hålen i sängytan.

Montering av grindar

RotoBed®Home kan levereras med grindar i metall eller ek faner. Oavsett modell är grindarna monterade och borttagna på samma sätt:

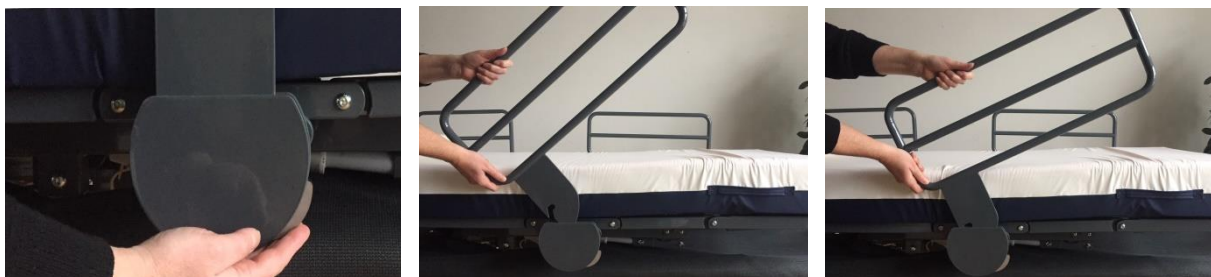

Tryck på det lilla fästet medan du lyfter grinden.

Grindarna sätts tillbaka på och låses automatiskt.

Lämna inte grindarna upprätt och löst i fästet. Detta kan orsaka klämrisk och skada på sängen under rotation.

OBS: RotoBed®Home ska inte användas av personer utan introduktion vid användning av sängen. RotoBed®Home är CE-märkt enligt direktiv (EU) 2006/42/EG. RotoBed®Home ska endast användas med fjärrkontroll. När du justerar sängpositionerna, se till att barn i närheten är medvetna om klämrisk. När sänkens bendel är upphöjd får den inte laddas av personer eller tunga föremål.

Snabbguide till RotoBed®Home



Inträde: Tryck änden så långt bak som möjligt för bästa komfort. Tryck på knappen **Liggposition**, tills sängen är helt roterad och madrassen är horisontal. Nu kan ryggstöd och ben-del justeras som önskas.




Utgång: Tryck på knappen **Stole-position** tills sängen stannar i utgångsposition. För att underlätta utgången kan ryggstödet drivas den sista delen framåt.



Obs: Vid leverans är RotoBed®Home inställd på att köra till en snedställd utgång för att underlätta övergången till rullstol eller rullator. För en vinkelrätt utgång, se bruksanvisningen.

Fjärrkontroll

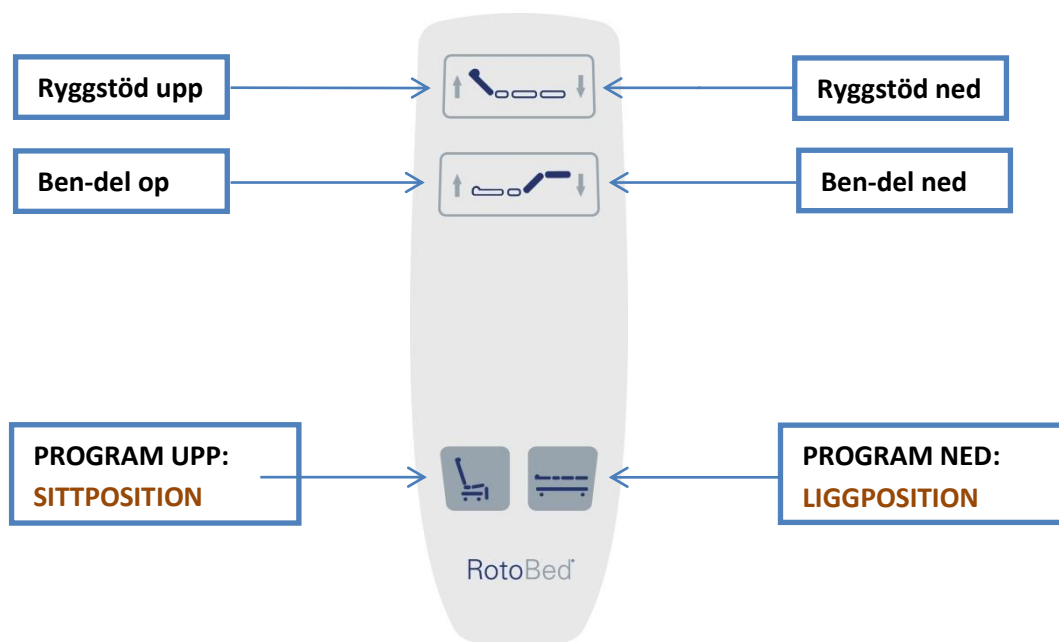

RotoBed®Home kan svänga antingen höger eller vänster. Därför kan fjärrkontrollen också anslutas till höger eller vänster. När fjärrkontrollen inte används hänger den på grinden.